

精製・廃棄説明書（歯科用）

1. 本剤を精製する容器及び超音波洗浄器をご準備下さい。
2. 処理中は換気を行い、皮膚や目に液がつかないように、保護手袋 / 保護衣 / 保護メガネを着用して下さい。
3. 本剤を専用容器内にて 400 倍に希釈して下さい。

Intercept : 水 = 1 : 399



①水を 400ml 入れ、
1ml 取り出す。



②Intercep® を
1ml 入れる。

1 リットル精製の場合

Intercept : 水 = 2.5 ml : 997.5 ml

4 リットル精製の場合

Intercept : 水 = 10ml : 3990ml

4. 容器に汚染された器具を 10 分間浸して下さい。
5. 10 分後器具を取り出し、水洗いして下さい。
6. 器具を最終滅菌工程へ
7. 溶液は毎日交換して下さい。また、溶液中の汚染状況に合わせて交換して下さい。

< 安全対策 >

子供の手の届かない所に保管して下さい。

本剤を使用の際は、安全の為、保護手袋 / 保護衣 / 保護メガネを着用して下さい。

本剤を漂白剤と混ぜないで下さい。

取扱説明書に記載された以外の方法で使用しないで下さい。

有効期限を過ぎた本剤は使用しないで下さい。

< 応急処置 >

目に入った場合、多量の水で 15 分間洗眼し、至急眼科医の診察を受けて下さい。

飲み込んだ場合は無理に吐き出させないで、至急医師の診察を受けて下さい。